


One Step Pack
Adapterワンステップパック アダプタ
吊り下げツール 取付説明


「ワンステップパック アダプタ」の使用に用いる吊り下げツール※の取付手順の説明です。
ご使用前にご一読ください。

■ 各部のなまえ

※吊り下げツールは製品に同梱しておりません。担当者にお問い合わせください。

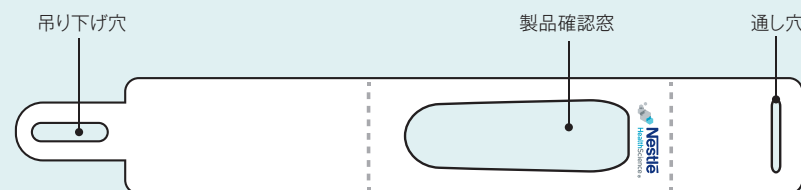

■ 吊り下げツールの取り付け方

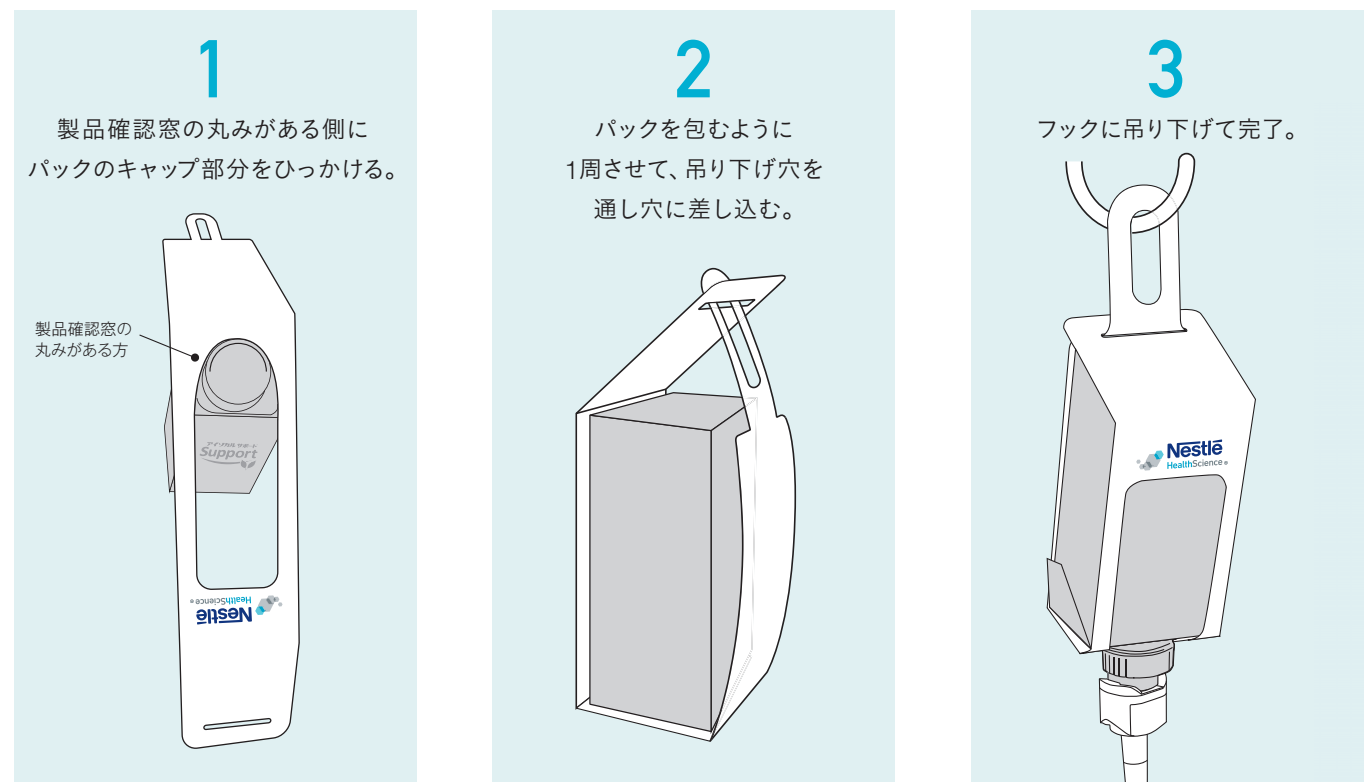

■ ワンステップパック アダプタを用いた使用上の注意

- 開封前にパッケージの破損などの異常が無いかよくご確認ください。
- 開封前によく振ってください。
- 開封後、流動食に異常(凝固、異臭など)が無いか、よくご確認ください。
- 準備時、流動食の流れや点滴筒内の様子など、異常が無いかよくご確認ください。

■ ワンステップパック アダプタの使用上の注意

- 包装が破損、汚損している場合や、製品に破損、変形などの異常が認められる場合は使用しないでください。
- 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。

2022年9月発行



ネスレ日本株式会社
ネスレ ヘルスサイエンス カンパニー
〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-20
<https://www.nestlehealthscience.jp/>

■ JANコード及び統一商品コード

包装	JANコード	統一商品コード
20個×10袋	4987788 512993	788 51299 3

原料樹脂: ポリプロピレン
耐熱温度: 100℃

®登録商標 A0707-01

One Step Pack
Adapter

流動食の準備を
さらにスムーズにする
アダプタが新登場。

1. ワンステップパックを開けて、
アダプタを
セットするだけ



2. 移し替えいらずで、
使用できる



One Step Pack Series

流動食の準備負担軽減、衛生面の向上を目指した使用方法 ワンステップパック アダプタ

Point 1 ハサミを使わないから安心して衛生的 ワンステップで開封できる

これまで



これから



準備のたびにハサミを消毒してパックをカットしたり、ハサミを再消毒する必要がありません。

Point 2 容器に移し替える手間が不要で衛生的 直接栄養セットに接続できる

これまで




これから



「ワンステップパック」に「ワンステップパック アダプタ」を取り付けるだけで、栄養セットにそのまま接続できます。容器に流動食の中身を注ぎ込まなくて良いので時間を短縮できます。

■ アダプタの構造

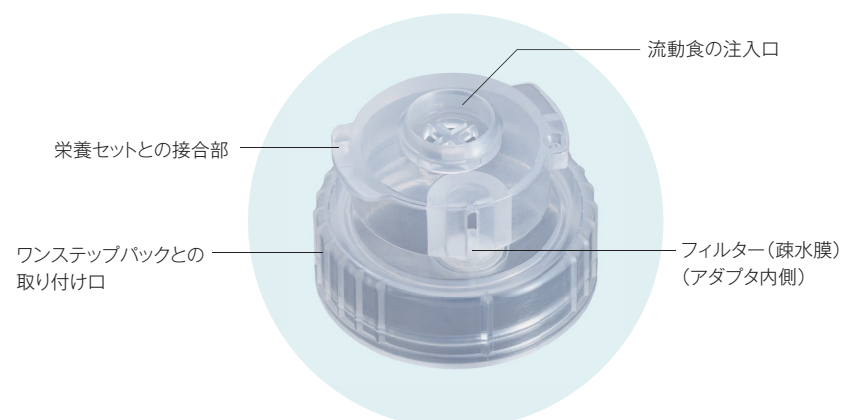


■ 使用手順



業務効率・衛生面について、従来紙パックと比べて高い評価、バッグタイプと比べて同程度の評価を得ました。

■ ワンステップパック アダプタの評価

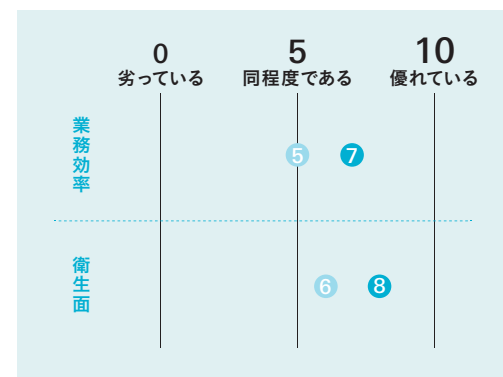

- 従来紙パックと比較した場合
- バッグタイプと比較した場合

ネスレ調べ
看護師92名アンケート
10段階評価で平均値を記載

業務効率

従来紙パックと比べ、流動食の準備から洗浄にかかる人手が削減できると評価されました。(バッグタイプと同程度)

衛生面

従来紙パックと比べ、流動食の移し替え操作が無いことで、菌汚染リスクが低減できると評価されました。(バッグタイプと同程度)

ネスレのワンステップパックシリーズ すべてに接続できます。



※ネスレ調べ：医療・介護現場へ販売された200ml紙パックタイプ流動食として(2021年)

医療・介護現場
シェア
No.1※